

**Bruder.**  
**EyeCompress**  
MOIST HEAT  
**Bruder.**  
**Masque Oculaire**  
CHALEUR HYDRATANTE

**PROFESSIONAL MODEL**  
**MODÈLE PROFESSIONNEL**

- ◆ Microwave Activated  
Activation au four à micro-ondes
- ◆ Naturally Hydrating  
Naturellement hydratant
- ◆ Washable & Reusable  
Lavable et réutilisable
- ◆ Anti-Bacterial  
Antibactérien
- ◆ Non-Allergenic  
Hypoallergénique

*Follow doctor's recommendations for use.  
Suivre les conseils de votre médecin avant utilisation*

**CONSEILS**

Assurez-vous que votre four à micro-ondes est vide. La plaque tournante peut rester. Afin de maintenir votre masque propre, placez le sur une assiette propre.

Après le soin, votre vision peut être floue car vos glandes relâchent des sécrétions bénéfiques. Votre vision s'éclaircira après quelques minutes.

Il n'est pas nécessaire de serrer le masque sur vos yeux. Il peut être utilisé sans le bandeau.

**UN**

20 secondes au four à micro-ondes

Pour augmenter la température, chauffez par fraction de 5 secondes supplémentaires. **NE PAS DEPASSER** 30 secondes au total.

**DEUX**

Toujours vérifier la chaleur du masque avant de le poser sur vos paupières.

Si le masque est trop chaud, retirez-le immédiatement et attendez 1 à 2 minutes avant de le remettre en place.

**TROIS**

Appliquez le masque sur vos yeux fermés pendant 10 minutes ou selon la prescription de votre médecin

Si vous réchauffez votre masque dans les 30 minutes, divisez le temps de chauffe par 2.

**LAVAGE**

Attendez 2 heures après utilisation. **LAVAGE A LA MAIN UNIQUEMENT**, à l'eau froide, avec un savon naturel

Laissez sécher au minimum 24 heures avant de le refaire chauffer. Lavez votre masque s'il a été en contact avec du maquillage, de la crème, de l'huile ou de la nourriture

Si vous l'utilisez quotidiennement, pensez à remplacer votre masque après 6 mois.

**MASQUE OCULAIRE CHAUFFANT  
HYDRATANT BRUDER**

Application rapide pour un soin chauffant hydratant en profondeur. Suivre les conseils de votre médecin. Instructions d'entretien à l'intérieur. Contient un masque binoculaire



**Bruder** Better.  
By Design.

[www.bruder.com](http://www.bruder.com) | (888) 827-8337

**Catalog / Référence #34160**